

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	1/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Etiketa CZ SLE0579-5

Trioderm® CARE

Nosní sprej

Obsahuje přírodní látky

Aloe vera

Mořská sůl

Trioderm® CARE Nosní sprej

Zdravotnický prostředek

Prostředek nosní hygieny s mořskou solí a hyaluronanem sodným

- pro celou populaci, pro děti od 4 let věku a pro diabetiky

360°aplikace

Použití: Ústí rozprašovače vložte na začátek nosní dutiny a natočte jej směrem k vnější straně nosu, aby rozprašovač nemohl poranit cévy na nosní přepážce. Stiskněte rozprašovač a mírně, nikoliv prudce, se nosem nadechněte.

Určený účel: zmírnění příznaků doprovázejících záněty dutiny nosní, vedlejších nosních dutin a nosohltanu (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpání nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice), ochrana, regenerace, zvlhčení nosní sliznice a zlepšení mukociliární funkce nosní sliznice při pobytu v klimatizovaném, suchém nebo prašném prostředí.

Kontraindikace: Nepoužívejte v případě alergické reakce na kteroukoli z obsažených složek přípravku. Nepoužívejte po prodělané operaci nebo úrazu nosu, vyčkejte do úplného zhojení rány, poraďte se s lékařem. Nepoužívejte u kojenců a dětí do 4 let. Použití spreje u těhotných žen a v době kojení konzultujte s lékařem.

Varování: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	2/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		


Složení:

Aqua, Sodium Chloride (Sea Salt), Polysorbate 80, Hydroxyethyl Urea, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Aloe Ferox Leaf Extract, Disodium Hydrogen Phosphate, Phenoxyethanol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Citric Acid, Propylene Glycol.

Datum revize textu: Listopad 2024

Výrobce: AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838,
www.trioderm.cz

Piktogramy:

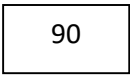
50 ml  

 1023

3



ALU

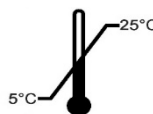

EAN 859 401 370 2812

SLE0579-5

Skládačka CZ-SK POM0348-5

Přední strana:

Trioderm® CARE

Nosní sprej

Obsahuje přírodní látky

Aloe vera

Mořská sůl

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	3/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

e 50 ml

Levá strana:

CZ

Trioderm® CARE Nosní sprej

Zdravotnický prostředek

**Prostředek nosní hygieny s mořskou solí a hyaluronanem sodným
- pro celou populaci, pro děti od 4 let věku a pro diabetiky**

Kombinuje 3 druhy účinků:

1. snižuje otok nosní sliznice
2. čistí, hydratuje nosní sliznici a urychluje její obnovu
3. zlepšuje funkci sliznice nosu

Trioderm® CARE Nosní sprej je určený pro hygienu nosní sliznice a pro zmírnění příznaků (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpaní nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice) při akutním zánětu nosu a nosohltanu virového původu (*Acute rhinitis a rhinopharyngitis*), u lehké formy akutního zánětu nosu a vedlejších nosních dutin (*Rhinosinusitis acuta*) nebo při alergické rýmě (*Allergic rhinitis*). Pomocný prostředek při léčbě chronické formy zánětu nosu (*Rhinosinusitis chronica*). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosním sprejem chrání nosní sliznici a pomáhají obnovit mukociliární funkci nosní sliznice při pobytu v klimatizovaných prostorách, v suchém nebo prašném prostředí a oddalují potřebu léčby zánětu nosu antihistaminiky a kortikosteroidními přípravky.

Sprej obsahuje hypertonický roztok mořské soli. Na principu osmózy odčerpává z nosní sliznice přebytečnou vodu způsobující otok. Hyaluronan sodný hydratuje a zlepšuje elasticitu nosní sliznice. Pomocné látky extrakt z aloe, vitamin E a urea hydratují nosní sliznici a pomáhají k regeneraci nosní sliznice. Přídavek mátové silice dodává vůni. Při výplachu sprejem se odplaví prach, nečistoty a pyly, sliznice se hydratuje a zlepši se její funkce a obrana proti infekci. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní postižení nosní sliznice.

Doba trvání: Pokud příznaky rýmy nevymizí po uplynutí 2 týdnů, vyhledat lékaře. **Při chronických potížích používat maximálně po dobu 30 dnů.**

Doba použitelnosti: Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

Datum revize textu: Listopad 2024.

Výrobce: AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838,
www.trioderm.cz

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	4/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Pravá strana:

SK

Trioderm® CARE Nosový sprej

Zdravotnická pomôcka

Prostriedok nosovej hygieny s morskou soľou a hyaluronanom sodným - pre celú populáciu, pre deti od 4 rokov veku a pre diabetikov.

Kombinuje 3 druhy účinkov:

- 1. znižuje opuch nosovej sliznice**
- 2. čistí a hydratuje sliznicu a zrýchľuje obnovu nosovej sliznice**
- 3. zlepšuje mukociliárnu funkciu sliznice nosa**

Trioderm® CARE Nosový sprej je určený pre hygienu nosovej sliznice a pre zmiernenie príznakov (opuch nosovej sliznice, výtok z nosa, kýchanie, upchatie nosa, sťažené dýchanie nosom, suchá nosová sliznica) pri akútnom zápale nosa a nosohltana vírusového pôvodu (*Acute rhinitis a rhinopharyngitis*), u ľahkej formy akútneho zápalu nosa a prínosových dutín (*Rhinosinusitis acuta*) alebo pri alergickej nádche (*Allergic rhinitis*). Pomocný prostriedok pri liečbe chronickej formy zápalu nosa (*Rhinosinusitis chronica*). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosovým sprejom chránia nosovú sliznicu a pomáhajú obnoviť mukociliárnu funkciu nosovej sliznice pri pobyte v klimatizovaných priestoroch, v suchom alebo prašnom prostredí a oddaľujú potrebu liečby zápalu nosa antihistaminikami a kortikosteroidovými prípravkami.

Sprej obsahuje hypertonický roztok morskej soli. Na princípe osmózy odčerpáva z nosovej sliznice prebytočnú vodu spôsobujúci opuch. Hyaluronan sodný hydratuje a zlepšuje elasticitu nosovej sliznice. Pomocné látky extrakt z aloe, vitamín E a urea hydratujú a napomáhajú k regenerácii nosovej sliznice. Prídavok mätovej silice dodáva vôňu. Pri výplachu sprejom sa odplaví prach, nečistoty a peľ, sliznica sa hydratuje a zlepši sa jej funkcie a obrana proti infekcii. Komplexný účinok obsiahnutých zložiek prináša úľavu, upokojí a zmierni postihnutie nosovej sliznice.

Doba trvania: Ak príznaky nádchy nevymiznú po uplynutí 2 týždňov, vyhľadajte lekára. **Pri chronických problémoch používať maximálne po dobu 30 dní.**

Doba použiteľnosti: Spotrebujte najneskôr do dátumu uvedeného na dne obalu.

Dátum revízie textu: November 2024.

Výrobca: AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838, www.trioderm.cz

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	5/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Distribútor pre SR: AVEPHARMA, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovensko,
www.avepharma.eu

Zadní strana SK:

Trioderm® CARE
Nosový sprej

Obsahuje prírodné látky


Aloe vera

Morská soľ

Složení/ Zloženie:

Aqua, Sodium Chloride (Sea Salt), Polysorbate 80, Hydroxyethyl Urea, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Aloe Ferox Leaf Extract, Disodium Hydrogen Phosphate, Phenoxyethanol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Citric Acid, Propylene Glycol.

Piktogramy:

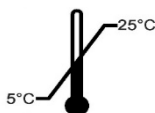

PAP

EAN 859 401 370 2812

Spodní víčko:



Spodní chlopeň:

POM0348-5

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	6/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Příbalový leták – CZ/SK POM0863-1

Přední strana

Trioderm® CARE

Nosní sprej

Obsahuje přírodní látky

Aloe vera

Mořská sůl

Pro celou populaci, pro děti od 4 let věku a pro diabetiky

360°aplikace

Nesterilní zdravotnický prostředek určený ke zmírnění příznaků rýmy. Zvlhčuje, ochraňuje a čistí sliznici dutiny nosní.

**Prostředek nosní hygieny s mořskou solí a hyaluronanem sodným
- pro celou populaci, pro děti od 4 let věku a pro diabetiky**

Kombinuje 3 druhy účinků:

- 1. snižuje otok nosní sliznice**
- 2. čistí, hydratuje nosní sliznici a urychluje její obnovu**
- 3. zlepšuje funkci sliznice nosu**

Trioderm® CARE Nosní sprej je určený pro hygienu nosní sliznice a pro zmírnění příznaků (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpání nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice) při akutním zánětu nosu a nosohltanu virového původu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u lehké formy akutního zánětu nosu a vedlejších nosních dutin (Rhinosinusitis acuta) nebo při alergické rýmě (Allergic rhinitis). Pomocný prostředek při léčbě chronické formy zánětu nosu (Rhinosinusitis chronica). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosním sprejem chrání nosní sliznici a pomáhají obnovit mukociliární funkci nosní sliznice při pobytu v klimatizovaných prostorách, v suchém nebo prašném prostředí a oddalují potřebu léčby zánětu nosu antihistaminiky a kortikosteroidními přípravky.

Sprej obsahuje hypertonický roztok mořské soli. Na principu osmózy odčerpává z nosní sliznice přebytečnou vodu způsobující otok. Hyaluronan sodný hydratuje a zlepšuje elasticitu nosní sliznice. Pomocné látky extrakt z aloe, vitamin E a urea hydratují nosní sliznici a pomáhají k regeneraci nosní sliznice. Přídavek mátové silice dodává vůni. Při výplachu sprejem se odplaví prach, nečistoty a pyly, sliznice se hydratuje alepší se její funkce a

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	7/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek:		
Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

obrana proti infekci. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní postižení nosní sliznice.

Určený účel: zmírnění příznaků doprovázejících záněty dutiny nosní, vedlejších nosních dutin a nosohltanu (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpání nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice), ochrana, regenerace, zvlhčení nosní sliznice a zlepšení mukociliární funkce nosní sliznice při pobytu v klimatizovaném, suchém nebo prašném prostředí.

Indikace: hygiena nosní sliznice při akutním zánětu nosu a nosohltanu virového původu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u lehké formy akutního zánětu nosu a vedlejších nosních dutin (Rhinosinusitis acuta) nebo při alergické rýmě (Allergic rhinitis). Pomocný prostředek při léčbě chronické formy zánětu nosu (Rhinosinusitis chronica). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosním sprejem chrání nosní sliznici a pomáhají obnovit mukociliární funkci nosní sliznice při pobytu v klimatizovaných prostorách, v suchém nebo prašném prostředí a pomáhají oddálit potřebu léčby zánětu nosu antihistaminiky a kortikosteroidními přípravky.

Kontraindikace: Nepoužívejte v případě alergické reakce na kteroukoli z obsažených složek přípravku. Nepoužívejte po prodělané operaci nebo úrazu nosu, vyčkejte do úplného zhojení rány, poraďte se s lékařem. Nepoužívejte u kojenců a dětí do 4 let. Použití spreje u těhotných žen a v době kojení konzultujte s lékařem.

Zamýšlené místo aplikace: nosní dutina

Návod k použití/Dávkování: Před aplikací nosního spreje mírně předkloňte hlavu. Ústí rozprašovače vložte na začátek nosní dutiny a natočte jej směrem k vnější straně nosu, aby rozprašovač nemohl poranit cévy na nosní přepážce. Stiskněte rozprašovač a mírně, nikoliv prudce, se nosem nadechněte. Aplikovaný roztok se touto cestou vmísí do přirozeně proudícího vzduchu a zanese se do nosních záhybů. Vydechněte ústy. Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy. Postup opakujte do druhé nosní dírky. Množství aplikované dávky se liší podle účelu použití spreje. Pokud potřebujete nosní sliznici zvlhčit, dávkujte množství, které vyvolá pocit provlhčení. Při aplikaci spreje pro odstranění nečistot z dutiny nosu se po každé dávce vysmrkejte a dávku opakujte do vymizení nečistot. Při nachlazení nebo otoku dutiny nosní způsobené alergií aplikujte u dospělých nosní sprej 2-6x denně po dobu 1-2 vteřin. U dětí od 4 do 12 let se doporučuje ošetření provádět 2-3x denně. Nadbytek roztoku nechte volně odtéct po sliznici nosu, potom jej vysmrkejte. Rozprašovač spreje po použití omyjte vodou a mýdlem, osušte. Z hygienických důvodů se doporučuje použít sprej pro jednoho člověka.

Doba trvání: Pokud příznaky rýmy nevymizí po uplynutí 2 týdnů, vyhledat lékaře. Při chronických potížích používat maximálně po dobu 30 dnů.

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	8/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek:		
Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Varování: U přecitlivělých osob může způsobit alergickou reakci. Může způsobit krátkodobé podráždění (pálení, štípání) nosní sliznice. Jde o očekávaný vedlejší účinek, který není závadou ani překážkovou určeného účelu použití a neoslabuje léčebný účinek. Chraňte oči před zásahem spreje. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobcí a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru.

VAROVÁNÍ: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

Složení: Aqua, Sodium Chloride (Sea Salt), Polysorbate 80, Hydroxyethyl Urea, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Aloe Ferox Leaf Extract, Disodium Hydrogen Phosphate, Phenoxyethanol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Citric Acid, Propylene Glycol.

Datum revize textu: Listopad 2024.

Výrobce: AVEFLOR, a.s., Budceves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838, www.trioderm.cz

Piktogramy:

e 50 ml  1023

Zadní strana

Trioderm® CARE
Nosový sprej

Obsahuje přírodní látky
Aloe vera
Morská sol'

Pre celú populáciu, pre deti od 4 rokov veku a pre diabetikov

360°aplikácia



	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	9/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Nesterilná zdravotnícká pomôcka určená na zmiernenie príznakov nádchy. Zvlhčuje, ochraňuje a čistí sliznicu dutiny nosnej.

Prostriedok nosovej hygieny s morskou ředek nosní hygieny s morskou soľou a hyaluronanom sodným

Kombinuje 3 druhy účinkov:

- 1. snižuje opuch nosovej sliznice**
- 2. čistí a hydratuje sliznicu a zrýchľuje obnovu nosovej sliznice**
- 3. zlepšuje funkciu sliznice nosa**

Trioderm® CARE Nosový sprej je určený pre hygienu nosovej sliznice a pre zmiernenie príznakov (opuch nosovej sliznice, výtok z nosa, kýchanie, upchatie nosa, sťažené dýchanie nosom, suchá nosová sliznica) pri akútnom zápale nosa a nosohltanu vírusového pôvodu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u ľahkej formy akútneho zápalu nosa a prínosových dutín (Rhinosinusitis acuta) alebo pri alergickej nádche (Allergic rhinitis). Pomocný prostriedok pri liečbe chronickej formy zápalu nosa (Rhinosinusitis chronica). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosovým sprejom chránia nosovú sliznicu a pomáhajú obnoviť mukociliárnu funkciu nosovej sliznice pri pobyte v klimatizovaných priestoroch, v suchom alebo prašnom prostredí a odďaľujú potrebu liečby zápalu nosa antihistaminikami a kortikosteroidovými prípravkami.

Sprej obsahuje hypertonický roztok morskej soli. Na princípe osmózy odčerpáva z nosovej sliznice prebytočnú vodu spôsobujúci opuch. Hyaluronan sodný hydratuje a zlepšuje elasticitu nosovej sliznice. Pomocné látky extrakt z aloe, vitamín E a urea hydratujú a napomáhajú k regenerácii nosovej sliznice. Prídavok mätovej silice dodáva vôňu. Pri výplachu sprejom sa odplaví prach, nečistoty a peľ, sliznica sa hydratuje a zlepší sa jej funkcie a obrana proti infekcii. Komplexný účinok obsiahnutých zložiek prináša úľavu, upokojí a zmierni postihnutie nosovej sliznice. "

Účel určenia: zmiernenie príznakov sprevádzajúcich zápal dutiny nosovej, prínosových dutín a nosohltanu (opuch nosovej sliznice, výtok z nosa, kýchanie, upchatie nosa, sťažené dýchanie nosom, suchá nosová sliznica), ochrana, regenerácia, zvlhčenie nosovej sliznice a zlepšenie mukociliárnej funkcie nosovej sliznice pri pobyte v klimatizovanom, suchom alebo prašnom prostredí.

Indikácia: hygiena nosovej sliznice pri akútnom zápale nosa a nosohltanu vírusového pôvodu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u ľahkej formy akútneho zápalu nosa a prínosových dutín (Rhinosinusitis acuta) alebo pri alergickej nádche (Allergic rhinitis). Pomocný prostriedok pri liečbe chronickej formy zápalu nosa (Rhinosinusitis chronica). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosovým sprejom chránia nosovú sliznicu a pomáhajú obnoviť

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	10/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek:		
Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

mukociliární funkci nosové sliznice při pobyte v klimatizovaných priestoroch, v suchom alebo prašnom prostredí a oddávajú potrebu liečby zápalu nosa antihistaminikami a kortikosteroidovými prípravkami.

Kontraindikácie: Nepoužívajte v prípade alergickej reakcie na ktorúkoľvek z obsiahnutých zložiek prípravku. Nepoužívajte po operácii alebo úraze nosa, počkajte do úplného zahojenia rany, poraďte sa s lekárom. Nepoužívajte u dojčiat a detí do 4 rokov. Použitie spreja u tehotných žien a v čase dojčenia konzultujte s lekárom.

Zamýšľané miesto aplikácie: nosová dutina

Návod na použitie/Dávkovanie: Pred aplikáciou nosového spreja mierne predkloňte hlavu. Ústí rozprašovača vložte na začiatok nosovej dutiny a natočte ho smerom k vonkajšej strane nosa, aby rozprašovač nemohol poraniť cievy na nosovej prepážke. Stlačte rozprašovač a mierne, nie prudko, sa nosom nadýchnite. Aplikovaný roztok sa touto cestou vmieša do prirodzene prúdiaceho vzduchu a zanesie sa do nosových záhybov. Vydýchnite ústami. Vytiahnite trysku z nosovej dierky a znova vydýchnite ústami. Postup opakujte do druhej nosovej dierky. Množstvo aplikovanej dávky sa líši podľa účelu použitia spreja. Ak potrebujete nosovú sliznicu zvlhčiť, dávajte množstvo, ktoré vyvolá pocit prevlhčenia. Pri aplikácii spreja pre odstránenie nečistôt z dutiny nosa sa po každej dávke vysmrkajte a dávku opakujte do vymiznutia nečistôt. Pri nachladnutí alebo opuchu dutiny nosovej spôsobené alergiou aplikujte u dospelých nosový sprej 2 - 6x denne po dobu 1 - 2 sekúnd. U detí od 4 do 12 rokov sa odporúča ošetrovanie prevádzať 2 - 3x denne. Nadbytok roztoku nechajte voľne odtiecť po sliznici nosa, potom ho vysmrkajte. Rozprašovač spreja po použití umyte vodou a mydlom, osušte. Z hygienických dôvodov sa odporúča použiť sprej pre jedného človeka.

Doba trvania: Ak príznaky nádchy nevymiznú po uplynutí 2 týždňov, vyhľadajte lekára. Pri chronických problémoch používať maximálne po dobu 30 dní.

Varovanie: U precitlivenejších osôb môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť krátkodobé podráždenie (pálenie, štiepanie) nosovej sliznice. Ide o očakávaný vedľajší účinok, ktorý nie je závadou ani prekážkou účelu určenia a neoslabuje liečebný účinok. Chránite oči pred zásahom spreja. Akýkoľvek závažný nežiaduci účinok súvisiaci s týmto výrobkom by mal byť hlásený výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného zberu.

POZOR: Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chránite pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu detí.

	Vydání č.:	5
	Datum vydání:	18. 11. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z18	Strana	11/11
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z18 Trioderm® CARE Nosní sprej		

Doba použitelnosti: Spotřebujte najneskôr do dátumu uvedeného na dne obalu.

Zloženie: Aqua, Sodium Chloride (Sea Salt), Polysorbate 80, Hydroxyethyl Urea, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Aloe Ferox Leaf Extract, Disodium Hydrogen Phosphate, Phenoxyethanol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Citric Acid, Propylene Glycol.

Dátum revízie textu: November 2024.

Výrobca: AVEFLOR, a.s., Budceves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838, www.trioderm.cz

Distribútor pre SR: AVEPHARMA, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovensko, www.avepharma.eu

Piktogramy:



POM0863-1

Změny a revize:

Revize č.	Popis	Datum revize
4	Doplnění textu na základě nálezu notifikované osoby ITC a.s. z dozorového auditu a z přezkoumání Zprávy o klinickém hodnocení: - Doba trvání - Varování - Datum revize textu	18. 11. 2024

Vypracoval: (VREG)	Uvolnil: (PREG)	Schválil (AREG):	Platnost od:
MVDr. Renáta Valášková	Bc. Lucie Beránková	Lenka Jerieová	18. 11. 2024
Datum vydání: 18. 11. 2024			