

	Vydání č.:	3
	Datum vydání:	24. 9. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z38, SZ85, SZ90, Z47	Strana	1/3
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z38, SZ85, SZ90, Z47 Trioderm® CARE Chladicí sprej		

CZ

Trioderm® CARE Chladicí sprej

Zdravotnický prostředek pro rychlou úlevu od bolesti

Vhodný i pro děti

Všeobecný popis:

Trioderm® CARE Chladicí sprej je chladicí sprej pro rychlou úlevu od bolesti spojené s pohmožděním svalů, podvrtnutím kloubů, svalovými křečemi a jinými zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo podvrtnutí a pro zmírnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly. Obsahuje nízkovroucí látky působící na postiženém místě jako lokální anestetikum. Vytváří okamžitý chladivý účinek v místě ošetření, zmírní na 3 minuty pocit bolesti a uvolní postižené místo.

Určený účel:

Přechodné zmírnění bolesti při pohmoždění svalů, podvrtnutí kloubů, svalových křečích a jiných zraněních v důsledku nárazu, pádu nebo zvýšené sportovní zátěže a zmírnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly.

Indikace:

Bolesti spojené s pohmožděním svalů (*Musculus contusus*), podvrtnutím kloubů (*Iuncturam distorsio*), se svalovými křečemi (*Musculus distentio*) a jinými menšími sportovními zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo zvýšené zátěže (*Athletae effectus auctus*) a bolesti provázející drobné zákroky, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly.

Kontraindikace:

Nestříkat delší dobu, ani z kratší vzdálenosti, aby nedošlo k tvorbě omrzlin. Nepoužívat na obličej, krk, citlivé oblasti těla nebo otevřené rány. Nepoužívat v případě alergické reakce na některou z obsažených složek. Nepoužívat u dětí do 3 let. Použití u těhotných žen a v době kojení konzultovat s lékařem.

Zamýšlený uživatel: pro celou populaci, pro děti od 3 let věku a pro diabetiky.

Zamýšlené místo aplikace: neporušená kůže na postižených místech těla.

Doba trvání: přechodný účinek do 3 minut.

	Vydání č.:	3
	Datum vydání:	24. 9. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z38, SZ85, SZ90, Z47	Strana	2/3
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z38, SZ85, SZ90, Z47 Trioderm® CARE Chladicí sprej		

Doporučená dávka, návod k použití:

Trioderm® CARE Chladicí sprej se nanáší stisknutím rozprašovače na kůži nad postiženým místem ze vzdálenosti 15 cm od povrchu těla, aplikuje se 2 - 3x opakovaným nástřikem po dobu 5 vteřin.

Zvláštní požadavky na bezpečnost pro určený účel: U přecitlivělých osob může způsobit alergickou kožní reakci. V případě silného zčervenání ošetřeného místa, vzniku omrzliny nebo puchýře po nadměrném použití spreje a při pochybnostech vždy vyhledat lékaře. Chraňte oči před zásahem spreje. Sprej nevdechujte. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobcí a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru.

Doba použitelnosti: 30 měsíců. Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

Složení: BUTANE, PROPANE, ISOBUTANE



Datum revize textu: září 2024

UDI-DI: viz čárový kód
UDI-PI: viz dno nádoby

Výrobce:

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838,
www.trioderm.cz

Značení na obalu:

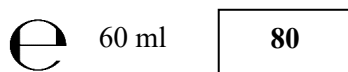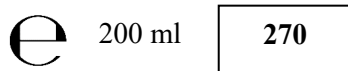


	Vydání č.:	3
	Datum vydání:	24. 9. 2024
	Počet příloh:	0
Číslo: ZVPI – Z38, SZ85, SZ90, Z47	Strana	3/3
Závazný vzor informace pro uživatele		
Výrobek: Z38, SZ85, SZ90, Z47 Trioderm® CARE Chladicí sprej		

e 400 ml 520



Nebezpečí

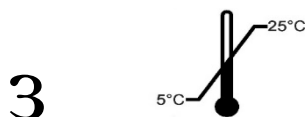

..... na dně nádoby

SLE1143-1 (Z380000)

EAN 8594013704694

Změny a revize:

Revize č.	Popis	Datum revize
0	Zavedení dokumentu	7.4.2021
1	Zavedení velikosti balení 400 ml Datum revize textu	Červen 2023
2	UDI-DI UDI-PI	Září 2024